


# 自着性伸縮包帯 くっつくバンデージ 止血用途のご提案



## ●製品特長

- 布地に伸縮性があり、**適度な圧迫感**が得られます。
- 包帯同士を重ねるだけで、くっつきます。**手袋や衣服には付きません。**
- ディスポ(使い捨て)なので、**衛生的にご使用**頂けます。
- 手切れ性に優れているため、手袋をしたまま**簡単にカット**できます。
- 粘着剤には脱タンパクの天然ゴムラテックスを使用しています。

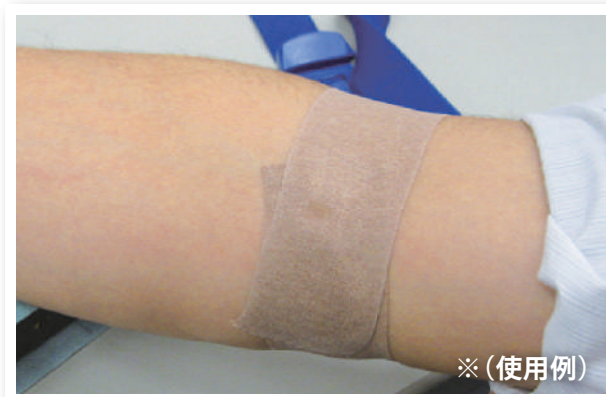

※(使用例)

## ●ご使用方法

- 穿刺部に止血用絆創膏や酒精綿を当てた上から、1周半～2周重ねて巻く。

## ●用途

- 採血後、透析後の穿刺部圧迫の補助材として。  
(対象例)：荷物を持っている、杖をついているなど、用手圧迫が困難な方。  
絆創膏などに、かぶれやすい方。

## ●使用上の注意

- 過度に引っ張って巻くと、血行障害を起こすことがあります。
- 皮膚刺激や血行障害を避けるため、止血が確認されたら、速やかにはずしてください。

## 《 規 格 》

製品名	品番	サイズ(伸長時)	1箱
自着性伸縮包帯 くっつくバンデージ	KB38	38mm×4m	12巻
	KB50	50mm×4m	12巻
	KB38L	38mm×8m	12巻
	KB50L	50mm×8m	12巻